

Produktinformation

Omnident Alginat



Neue Verpackung – neue Qualität

Das bewährte OMNIDENT Alginat hat sich nicht nur äußerlich mit seiner neuen Umverpackung verändert. Wir freuen uns, Sie auch über die noch einmal deutlich verbesserten Material- und Verarbeitungseigenschaften informieren zu können.

OMNIDENT Alginat hat nun

- ▶ eine deutlich cremigere Konsistenz nach dem Anmischen
 - ▶ einen frischeren Pfefferminz – Geschmack
- sowie
- ▶ eine verbesserte Zeichnungsschärfe durch ein sattes Blau.

Bitte beachten Sie für ein optimales Ergebnis das neue Mischungsverhältnis von Pulver : Flüssigkeit!

Das neue Mischungsverhältnis finden Sie auf der Rückseite bzw. entnehmen Sie bitte der bedruckten Beutelaußenseite oder der Gebrauchsanweisung.

Bitte verwenden Sie hierfür ausschließlich das neue Meßbesteck!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
mit Ihrem neuen OMNIDENT Alginat.

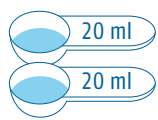
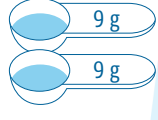
Ihre OMNIDENT GmbH



Produktinformation

Omnident Alginate

Mischungsverhältnis und Zeitangaben

1. 	 20 ml H ₂ O	 40 ml H ₂ O
2. 	 9 g Alginate	 18 g Alginate
	= 	= 

Anmischzeit
mixing time
mengtijd
temps de mélange
tempo di miscelazione

45''

Verarbeitungszeit gesamt
total working time
totale verwerkingstijd
temps de travail total
tempo di lavoro totale

1'35''

Abbindezeit
setting time
instellen van de tijd
temps de prise
tempo di presa

2'35''

Bitte beachten Sie für ein optimales Ergebnis das neue Mischungsverhältnis von Pulver : Flüssigkeit!

Bitte verwenden Sie hierfür ausschließlich das neue Meßbesteck!