

Omniwipes Dry

Trockene Desinfektiontücher zum Nachfüllen der Omniwipes Dry Spenderbox

DE

Gebrauchsanweisung

Art der Anwendung: Vliestücher für die Tränkung mit gebrauchsfertigen Flächendesinfektions- oder Reinigungslösungen.

Beim Einsatz in Spendersystemen: Die trockene Tücherrolle in einen geeigneten Entnahmebehälter stellen und von oben gleichmäßig mit der betreffenden, geeigneten Flüssigkeit und der dafür geeigneten Tränkmenge langsam übergießen. Das Tuch in der Mitte der Vliesrolle anziehen und von unten durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Danach den Deckel fest auf den Entnahmebehälter drücken und dicht verschließen. Die getränkte Rolle ca. 30 Minuten stehen lassen, bis alle Tücher vollständig gleichmäßig befeuchtet sind. Die Einwirkzeiten der jeweiligen mit dem entsprechenden Tuch kompatiblen Tränkflüssigkeit (nach EN 16615) ist zu beachten. Die getränkten Tücher dürfen maximal 28 Tage verwendet werden! Die Aufbereitung des Entnahmeeimers ist mit einem geeigneten Desinfektionstuch durchzuführen. Nur für professionelle Anwender!

Empfohlene Tränkmenge je Rolle: 2,0 Liter.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient

15 X 23 cm
100 % PET
Vliesgewicht: 50 g/m²

2 Rollen à

240 Blatt

Angaben zur Tränkflüssigkeit (vom Anwender händisch auszufüllen):

Tränkflüssigkeit:

Menge Tränkflüssigkeit:

Charge Tränkflüssigkeit:

Name des Befüllenden:

Tränkdatum:

Tränkdatum + 28 Tage:

Unterschrift:



PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
D-64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0



Vertrieb durch:
OMNIDENT Dental- Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5
D-63110 Rodgau
Tel.: +49 (0) 6106 874-0