

Gebrauchsanleitung Ink Test easy „click and push“ (Tintentest)

Der Ink Test easy ist ein Siegelnahtdichtigkeitstest zur Routineüberprüfung von Siegel-nähten gemäß DIN EN ISO 11607-1 Anhang B, sowie ASTM F1929. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten (Kanalbildung etc.) werden sofort nach dem Entleeren der Einweg-pipette sichtbar. Es sind keine weiteren Hilfsmittel erforderlich. Der Test ist TRITON X frei!

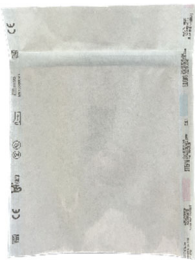
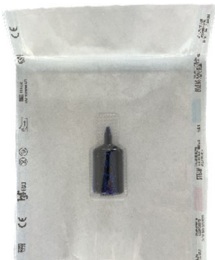
Gemäß Norm s.o. sind für Routinekontrollen Methode A oder B festzulegen.

Methode A Sterilisationsfolie Typ Rolle (1-Seiten Prüfung)

Ziehen Sie sich bitte stets Handschuhe an! Schützen Sie die Arbeitsplatte durch eine entsprechende Unterlage! Für evtl. entstehende Verunreinigungen übernehmen wir keine Haftung.

- Bereiten Sie ein ca. 15cm langes Stück Sterilisationsfolie mit einer Breite von mind. 150mm vor.
- Versiegeln Sie nun ein Ende der Sterilisationsfolie (Bild 1).
- Legen Sie den Ink Test mit dem Flaschenhals nach oben in die Folie ein (Bild 2).
- Halten Sie die Flasche mit dem Daumen fest und knicken die Öffnung nach oben ab (Bild 3).
- Drücken Sie die Tinte aus der Flasche aus.
- Lassen Sie die Testflüssigkeit nun max. 5 Sekunden einwirken (Bild 4).

Sie sollten nun **keine** Kanalbildung oder ähnliche Unregelmäßigkeiten feststellen (visuelle Prüfung). Entsorgen Sie anschließend die mit Tinte gefüllte Folie vorsichtig in einem Abfallbehälter.

			
Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4

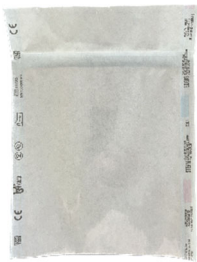
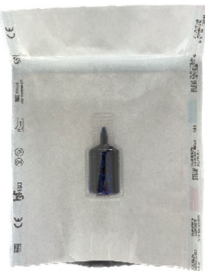
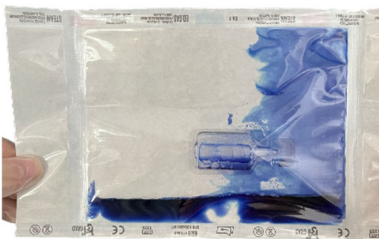
Methode B Sterilisationsfolie Typ Rolle (4-Seiten Prüfung)

Ziehen Sie sich bitte stets Handschuhe an! Schützen Sie die Arbeitsplatte durch eine entsprechende Unterlage! Für evtl. entstehende Verunreinigungen übernehmen wir keine Haftung.

- Bereiten Sie ein ca. 25cm langes Stück Sterilisationsfolie mit einer Breite von mind. 150mm vor.
- Versiegeln Sie ein Ende der Sterilisationsfolie (Bild 1).
- Legen Sie den Ink Test mittig mit dem Flaschenhals nach oben in die Folie ein (Bild 2).
- Verschweißen Sie nun die offene Seite der Folie.
- Halten Sie die Flasche mit dem Daumen fest und knicken die Öffnung nach oben ab (Bild 3).
- Drücken Sie die Tinte aus der Flasche aus.
- Lassen Sie nun die Testflüssigkeit an jeder Seite der Sterilisationsfolie max. 5 Sekunden einwirken (durch Spannen und Drehen der Folie - 4-Seiten Test, Bild 5).

Sie sollten nun **keine** Kanalbildung oder ähnliche Unregelmäßigkeiten feststellen (visuelle Prüfung). Entsorgen Sie anschließend die mit Tinte gefüllte Folie vorsichtig in einen Abfallbehälter.

Gleiches lässt sich mit bereits vorgefertigtem Sterilisationsbeutel durchführen.

		
Bild 1	Bild 2	Bild 3
		
Bild 4	Bild 5	

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Bei Hautreizungen bitte einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffneter Lidspalpe 10-15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend bitte einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund gründlich ausspülen. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas über den Mund verabreicht werden. Kein Erbrechen ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. Bei Beschwerden bitte einen Arzt aufsuchen.