

Gebrauchsanleitung Bowie & Dick Test

Der Bowie & Dick Test ist sowohl vor als auch nach der Anwendung trocken, kühl und dunkel zu lagern!

1. Testen Sie den Sterilisator täglich (falls vorgeschrieben) jedoch immer nach der Erstinstallation, Transport oder einer Reparatur.
2. Platzieren Sie das Testpaket mit der gelochten Seite nach oben auf dem untersten Tablett des nicht beladenen Autoklaven im vorderen Bereich der Tür.
3. Der Test ist nur dann aussagekräftig, wenn das Gerät, wie unter Punkt 2 beschrieben, nicht beladen ist. Andernfalls könnte es zu einem falschen Ergebnis kommen.
4. Führen Sie nun entweder einen Sterilisationszyklus (134° verpackt), oder das dafür vorgesehene B&D Testprogramm Ihres Autoklaven durch.
5. Öffnen Sie nach erfolgtem Zyklus den Autoklaven und entnehmen Sie das Bowie & Dick Testpaket (Achtung das Testpaket könnte noch heiß sein). Öffnen Sie das Testpaket und überprüfen Sie den mittig liegenden Testindikator auf entsprechenden Farbumschlag. Vergleichen Sie den Umschlag anhand des Schemas.
6. Auf der Rückseite des Testindikators haben Sie die Möglichkeit alle wichtigen Daten zu vermerken. Nutzen Sie diese bitte und legen Sie den Testindikator zwecks Archivierung ordnungsgemäß ab.

Schema

