

Manuelle Aufbereitung des Spenders HS1500

- Flasche aus dem Spender nehmen
- Spender von der Wandhalterung abnehmen
- Dosierpumpe wie in Anleitung gezeigt entnehmen
- Spender gründlich unter fließendem heißen Wasser reinigen
- Den Spender mit Einmaltüchern trocknen
- Spender mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel innen und außen einsprühen
- Bedarf anschließend mit Einmaltüchern abwischen, Einwirkzeit beachten
- Eine neue oder eine gesondert aufbereitete Dosierpumpe (s.u.) einsetzen
- Neues Gebinde einhängen

Manuelle Aufbereitung der Pumpe

- Pumpe zunächst mit heißem Wasser durchspülen und Produktreste abspülen
- Pumpen, die zur Dosierung von Seifen im Einsatz waren, mit Händedesinfektionsmittel durchspülen und einwirken lassen
- Anschließend Pumpe leer pumpen
- Nach vollständiger Trocknung Pumpe wieder einsetzen
- Hinweis: Keine Scheuermittel, keine ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden!